

Prévention des AES – Prélèvements sanguins sécurisés


Neutralisation immédiate de l'aiguille dès le retrait de la veine ou de l'artère

Sécurité intégrée à l'aiguille – Technique unimanuelle


BD Safety-Lok™ unité à prélèvement de sang Sécurité



1 - Dès le prélèvement effectué, appliquer la compresse sur le site de ponction. De l'autre main, saisir l'embase de l'étui protecteur jaune entre le pouce et l'index, et la tubulure avec les autres doigts.

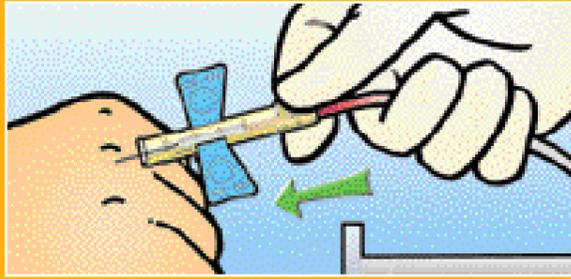


2 - Maintenir la tubulure et pousser l'étui protecteur jaune vers l'avant, en tendant le pouce et l'index, jusqu'à l'obtention d'un "clic".

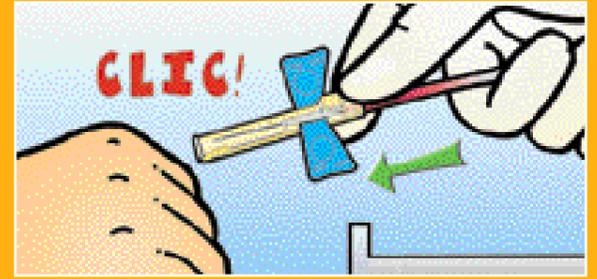


3 - Le "clic" en bout de course confirme la neutralisation complète de l'aiguille, en position verrouillée dans l'étui protecteur.

Veillez à éliminer le système complet selon les procédures en vigueur dans l'établissement.

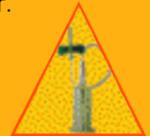


T.C. Communication 04 76 25 65 86


BD Eclipse™ aiguille Sécurité pour le prélèvement de sang

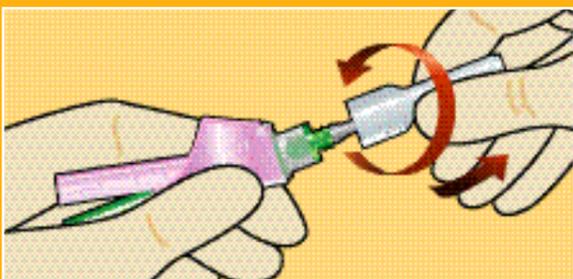


1 - Positionner le pouce et l'index sur les parties latérales de l'embase du système de protection mauve. Ôter le protecteur d'aiguille blanc.

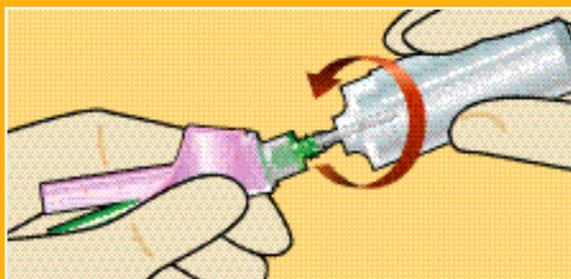


2 - Visser le corps sur l'aiguille (faire tourner le corps sans bouger la main qui maintient l'aiguille).

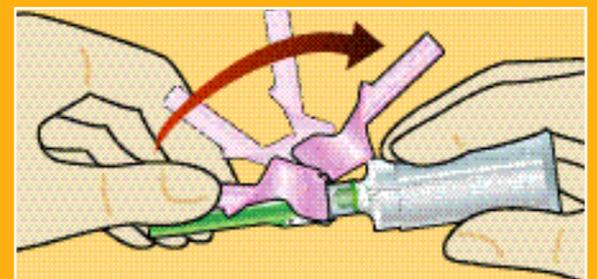

3 - Rabattre vers l'arrière le système de protection mauve (ne plus le manipuler jusqu'à la mise en sécurité du dispositif).

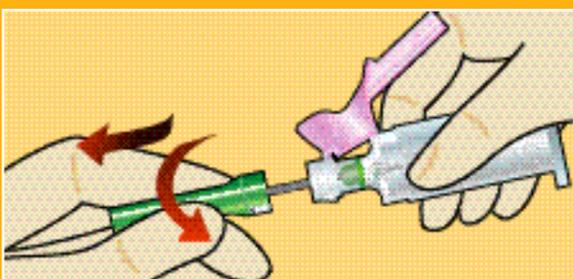

4 - Retirer le protecteur d'aiguille vert ou noir.

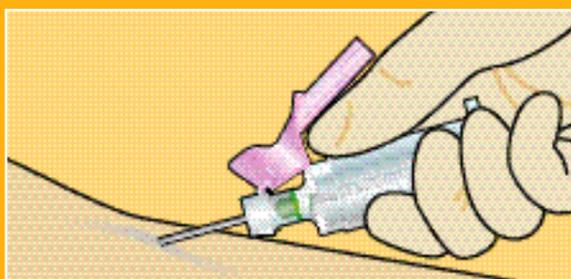

5 - Effectuer le prélèvement selon la procédure en vigueur.




6 - Dès le retrait de l'aiguille de la veine, rabattre vers l'avant le système de protection mauve jusqu'à entendre un "clic".




Veillez à éliminer le système complet selon les procédures en vigueur dans l'établissement.

© 2002 BD - 06/02 - BD, le logo BD, et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson & Company.


BD Eclipse™ aiguille Sécurité pour le prélèvement de sang artériel

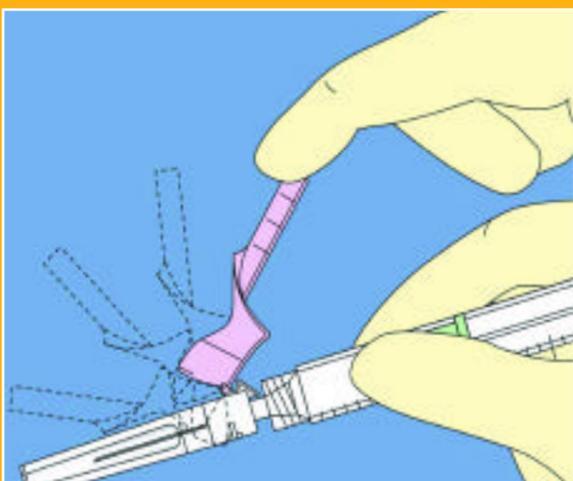

1- Maintenir la seringue d'une main. Avec l'autre main, rabattre vers l'arrière le système de protection mauve (ne plus le manipuler jusqu'à la mise en sécurité du dispositif).

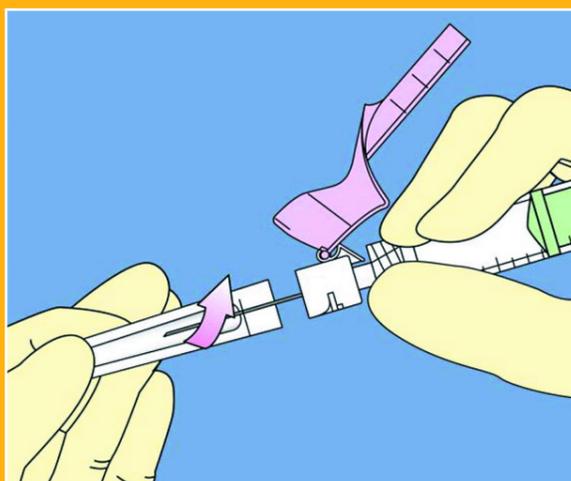

2- Retirer le protecteur d'aiguille blanc translucide. Réaliser la ponction artérielle selon la procédure habituelle.

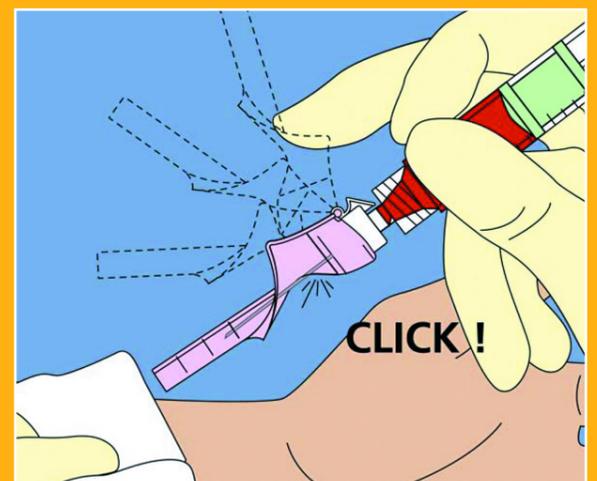

3- Dès le retrait de l'aiguille de l'artère, rabattre vers l'avant le système de protection mauve en appliquant une pression sur la partie plate avec l'index ou le majeur jusqu'à entendre un "clic" sonore.