

Le couple "classique"



1

"Ordre de prélèvement"

2

BD BACTEC™
PLUS Aérobic/F

BD BACTEC™
Lytic/10 Anaérobic F



BD BACTEC™
PLUS Anaérobic/F



BD BACTEC™
Peds PLUS/F



BD BACTEC™
Mycosis IC/F



BD BACTEC™
Myco/F Lytic



UNE GAMME COMPLÈTE DE FLACONS



BD BACTEC™ PLUS Aérobic/F

Ces milieux de culture contiennent des résines qui neutralisent une grande variété d'antibiotiques et permettent d'améliorer la mise en évidence des germes chez les patients sous antibiothérapie.



BD BACTEC™ Lytic/10 Anaérobic F

Ce milieu contient un agent lytique qui permet de détecter plus rapidement des organismes en partie phagocytés par les leucocytes.



BD BACTEC™ Peds PLUS/F

Ce milieu conçu pour les échantillons de faible volume permet d'optimiser la détection des germes pathogènes courants chez les enfants.



BD BACTEC™ Mycosis IC/F

Ce milieu fongique facilite la mise en évidence de levures qui peuvent être masquées par la prolifération bactérienne dans la culture.



BD BACTEC™ Myco/F Lytic

Ce milieu 7H9 supplémenté a été spécialement développé pour la détection des mycobactéries, levures et champignons dans le sang. Il contient un agent lytique qui permet de détecter plus rapidement des organismes en partie phagocytés.



BD Service Commandes
Tél. 04 76 68 36 44
ou 04 76 68 36 49
Fax. 04 76 68 35 06
www.diagdirect.com

BD Attaché de Clientèle
(Assistance Technique
et Scientifique)
Tél. 04 76 68 36 16
Fax. 04 76 68 35 04

BD Service Assistance Technique
(Instrumentation)
Tél. 01 45 12 50 50
Fax. 01 45 12 50 70
BDB_France_Technical_Support
@europe.bd.com



BD Diagnostics - Diagnostic Systems
11 rue Aristide Bergès - 38800 LE PONT DE CLAIR
Tel. 04 76 68 36 36 - Fax. 04 76 68 35 04
www.bd.com/france

Document non contractuel



Pour que chacun
vive en bonne santé

GAMME FLACONS BD BACTEC™ 9000



Hémoculture

Une gamme complète de flacons pour optimiser la détection de tous les germes

Pour plus de sécurité

- Compatibles avec le prélèvement BD Vacutainer®
- Résistants aux chocs
- Systèmes code-barre flacon et patient
- Dispositifs de subculture adaptés
- Code couleur évitant les inversions de flacons

Pour plus de performance

- Résines neutralisant les antibiotiques
- Agent lytique provoquant la libération des bactéries phagocytées et des éléments nutritifs sanguins
- Milieux de culture adaptés aux différents pathogènes
- Détection précoce par algorithmes spécifiques

Pour plus d'adaptabilité

- Double système de code-barre
- Délai d'attente optimisé avant introduction dans l'automate
- Large plage de température de conservation

Pour plus de productivité

- Identification par code-barre
- Prélèvement sans changer le corps de pompe
- Sortie des négatifs en série
- Pas de ventilation des flacons

Pour plus d'ergonomie

- Code-couleur flacon
- Faible poids des flacons
- Portoir adapté



PRÉLÈVEMENT DES FLACONS D'HÉMOCULTURE BD BACTEC™

Unité de prélèvement sécurité BD Vacutainer® Safety-Lok™

Le respect des précautions universelles impose le port de gants lors de l'acte de prélèvement.



Corps BD Vacutainer® pour le prélèvement des flacons d'hémoculture BD BACTEC™ et bilans sanguins avec les tubes BD Vacutainer®
(Diamètre interne : 17 mm - Profondeur : 47 mm)




1

Visser le corps BD Vacutainer® sur l'extrémité pourvue d'un pas de vis (ne pas retirer le manchon-valve en latex).



2

Oter le protecteur de l'aiguille à ailettes après avoir préparé le site de ponction.

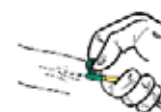

3

Introduire l'aiguille dans la veine en la tenant par les ailettes. Le sang doit apparaître à la naissance de la tubulure.

4

FLACONS

Désinfecter le bouchon du flacon.

Engager à fond le flacon aérobie dans le corps pour perforer la membrane du bouchon (maintenir le flacon en dessous du point de ponction). Répéter cette procédure avec le flacon anaérobie.



TUBES BD Vacutainer®

Avec bouchon sécurité BD Hemogard™


perforer le bouchon des tubes en les engageant à fond dans le corps (maintenir le tube en dessous du point de ponction).



5

Dès le prélèvement effectué, appliquer la compresse sur le site de ponction.

De l'autre main, saisir l'embase de l'étui protecteur jaune entre le pouce et l'index, et la tubulure avec les autres doigts.

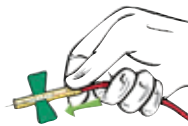

6

Maintenir la tubulure et pousser l'étui protecteur jaune vers l'avant, en tendant le pouce et l'index, jusqu'à l'obtention du "clic".



7

Le "clic" en bout de course confirme la neutralisation complète de l'aiguille, en position verrouillée dans l'étui protecteur.
Eliminer l'unité de prélèvement sécurité en fonction des procédures en vigueur dans l'établissement.

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT

1



Flacon d'hémoculture aérobie

2



Flacon d'hémoculture anaérobie

3



Tubes sans additif

4



Tubes coagulation

5



Autres tubes avec additifs

IMPORTANT : MERCI DE NE PAS COLLER L'ÉTIQUETTE PATIENT SUR L'ÉTIQUETTE CODE-BARRE DU FLACON