

Transfert de l'urine au moyen du kit de bactériologie (canule + tube)



A partir du pot de recueil :

- a) **Plonger** la canule dans l'urine.
- b) **Insérer** le tube et le percuter.
Le maintenir en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.


ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES



1• SANS ADDITIF




2• BACTÉRIOLOGIE

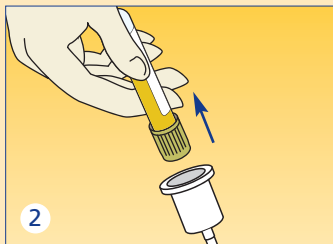

Attendre le remplissage complet et retirer le tube.

Veiller à remplir le tube jusqu'au repère de remplissage minimum indiqué sur l'étiquette.

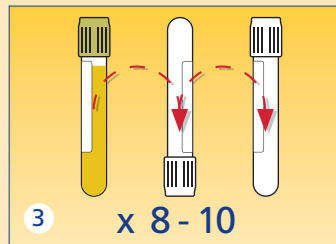

Homogénéiser par 8 à 10 retournements.

Identifier les échantillons et les **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Becton Dickinson France S.A.S. Siège social: 11, rue Aristide Bergès – B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex.
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.

BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2010 BD - ME_UrineTrans2a_LAM_05/10_V03



Pour que chacun
vive en bonne santé